

SV – Bruksanvisning

Hypokloritlösning 0,5 %



TILLÄMPLIGA PRODUKTER

QTY
REF

Beskrivning	Förp.storlek	Kat. nr
Hypokloritlösning 0,5 %	1000 mL	3917

AVSEDD ANVÄNDNING

Produkten används för rengöring och avlägsnande av prover som tagits från människokroppen. Produktens funktion är begränsad till intensiv rengöring, sköljning och tvättning av hematologiska analysatorer. Produkten är lämplig för förberedelse av diagnostiska analyser. Produkten är endast avsedd för laboratorieanvändning av yrkesverksam hälso- och sjukvårdspersonal. Den avsedda patientpopulationen är mänskliga patienter i behov av nämnda undersökningar.

SAMMANSÄTTNING

Produkten består av natriumhypoklorit (< 0,6 %), natriumhydroxid (< 0,5 %) och doftmedel (< 0,5 %).

PRINCIP

Användning av reagenser baserade på natriumhypoklorit rekommenderas av tillverkarna av hematologiska analysatorer för att hålla utrustningen i bra skick.

Hypokloritlösning 0,5 % är ett rengöringsmedel för akut rengöring som används för att ta bort rester av prover och kvarvarande reagenser som kan finnas i mätsystemets delar i hematologiska analysatorer. Medlet avlägsnar alla cellrester och proteinhaltiga avlagringar (serumalbuminer) samt rester av reagenser som kan finnas kvar efter användningen av analysatorn.

ANVÄNDNINGSBEGRÄNSNINGAR

Använd inte reagenser med synliga fysiska eller kemiska förändringar (färgavvikelse, grumlighet) eller i händelse av påverkan av förpackningsskada.

Se instrumentets användarhandbok för information om alla ytterligare användningsbegränsningar.

PROVER


Inte tillämpligt.

BEREDNING AV REAGENS

Denna reagens är bruksfärdig och kan appliceras direkt från behållaren. Ingen särskild reagensförberedelse krävs, såvida inte instrumentets användarhandbok inkluderar det.

För ytterligare information om speciella metoder: se bilagan.

FÖRVARINGSVILLKOR OCH HÅLLBARHET

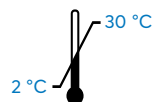

Använd inte reagensen efter det utgångsdatum som anges på förpackningen.

ANVÄNDINGSOMRÅDE

På grund av skillnader i riktlinjerna för hur olika rengöringsprocedurer ska genomföras för olika typer av analysatorer, ska hypokloritlösning 0,5 % användas enligt instrumenttillverkarens bruksanvisning och ska kopplas så som beskrivs i instrumentets användarhandbok.

BORTSKAFFNING

Kassera innehåll/behållare i en lämplig bearbetnings- eller avfallsanläggning i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar samt produktens egenskaper vid tiden för kasseringen.

VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

	H315: Irriterar huden.
	H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
	H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
FÖREBYGGANDE	P264: Tvätta grundligt efter användning.
	P280: Använd skyddshandskar/ skyddskläder/ ögonskydd/ ansiktsskydd.
	P273: Undvik utsläpp till miljön.
ÅTGÄRD	P332+P313: Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
	P362+P364: Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen.
	P337+P313: Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

För ytterligare information, se säkerhetsdatabladet.



ANVÄNDA SYMBOLER

Symbol	Symbolnamn och beskrivning	Symbol	Symbolnamn och beskrivning	Symbol	Symbolnamn och beskrivning
	CE-märkning för överensstämmelse		Medicinteknisk produkt för in vitro-diagnostik		Tillverkad i Polen
	Katalognummer		Produktantal i lådan		Förvaras torrt
	Ömtålig, hanteras försiktigt		Tillverkare		Utsätt inte för direkt solljus
	Använd inte produkten om förpackningen är skadad		Unik produktidentifikation		Försiktighet
	Läs bruksanvisningen		Tillverkningsdatum		Temperaturbegränsning
	Används före datum		Batchnummer		

BILAGA

På grund av skillnader i riktlinjerna för hur olika rengöringsprocedurer ska genomföras för olika typer av analysatorer, ska hypokloritlösning 0,5 % användas enligt instrumenttillverkarens bruksanvisning och ska kopplas så som beskrivs i instrumentets användarhandbok.

Rekommenderade instrumentmodeller:

Hypoklorit 0,5 %	Instrumentmodell*
Medel för akutrengöring	Abbott Cell-Dyn 1800, 1700, 1600, 1300
	ABX Pentra80, 60, 60C, 60C+, 60MS,
	ABX Micros 60, ES60, 45
	Benesphera™ H32, Benesphera™ H32 VET
	Beckman Coulter AcT 5™,
	Beckman Coulter AcT Diff™, AcT Diff 2™,
	Beckman Coulter AcT 8™, AcT 10™
	Diatron Abacus, Diatron Abacus Junior VET
	Drew Excell 18 (BT2100)
	Erma PCE-210
	Hospitex Hemascreen 18
	HTI Micros CC18
	Medonic CA620-20, CA620-16, CA530-16
	Melet-Schloesing MS9, MS4, MS8, MS8 VET
	Mindray BC-3200, BC-3000 Plus, BC-2800, BC-2300, BC-2000
	Nihon Kohden Celltac F MEK-8222K, Celltac ES MEK-7300, Celltac E MEK-7222K, Celltac™ α MEK-8118K + QA-810V
	Seac H20 Genius, SEAC H12
	Sysmex K4500, Sysmex K1000, Sysmex KX21, KX21-N

* Informationen som innefattas i detta dokument har inte godkänts av analysatorns tillverkare, utan är enbart avsedd som en rekommendation för användning. Läs alltid användarhandboken som tillhandahålls med utrustningen om frågor uppstår.

FRISKRIVNING

Vi lägger största vikt vid kvaliteten på våra produkter. Vid felfunktion eller missnöje: vänligen använd klagomålsformuläret på kontaktsidan för din lokala vwr.com-webbplats och ange referens- och batchnummer för berörd produkt.

Användaren måste vara medveten om de möjliga risker som kan uppstå om produkten används för annat ändamål än det som anges. Denna bruksanvisning undantar inte användaren från att ha kunskap om och implementera all information som reglerar användarens aktivitet. Det är användarens skyldighet att vidta de relevanta försiktighetsåtgärder som är nödvändiga vid användningen av denna produkt.

LOGG ÖVER ÄNDRINGAR

Denna bruksanvisning fastställdes i juni 2023 och ersätter alla föregående bruksanvisningar. Informationen baseras på vår nuvarande kunskap och erfarenhet.

VERSION 02

Ändringar som avser den senaste versionen av bruksanvisningen:

- Allmän uppdatering av layouten
- Mindre korrigeringar och förtydliganden

KONTAKT

Avantor Performance Materials Poland S.A.
Sowińskiego 11
44-101 Gliwice, Poland
+ 48 32 2392 000
dok@avantorsciences.com
www.avantorsciences.com

Alla allvarliga incidenter som har förekommit i samband med denna produkt måste anmälas till tillverkaren samt till ansvarig myndighet i det land där användaren och/eller patienten har sin hemvist. Var god kontakta Avantors kundtjänstavdelning.