

## SV – Bruksanvisning

# Klinipath objektglas för mikroskopi



| TILLÄMPLIGA PRODUKTER                              | QTY               | REF         |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| Beskrivning                                        | Förp.storlek      | Kat. nr     |
| MIKROSKOP KP MATTSKLIPPE OBJEKTGLAS                |                   |             |
| DUBBELT MATTSKLIPPE                                | 1 * 2500 artiklar | KP-SIL-3049 |
| MIKROSKOP KP MATTSKLIPPE OBJEKTGLAS BLÅ            | 1 * 2500 artiklar | KP-SIL-3057 |
| MIKROSKOP KP MATTSKLIPPE OBJEKTGLAS GULA           | 1 * 2500 artiklar | KP-SIL-3058 |
| MIKROSKOP KP MATTSKLIPPE OBJEKTGLAS ROSA           | 1 * 2500 artiklar | KP-SIL-3059 |
| MIKROSKOP KP MATTSKLIPPE OBJEKTGLAS GRÖNA          | 1 * 2500 artiklar | KP-SIL-3060 |
| MIKROSKOP KP MATTSKLIPPE OBJEKTGLAS ORANGE         | 1 * 2500 artiklar | KP-SIL-3061 |
| MIKROSKOP KP MATTSKLIPPE OBJEKTGLAS LILA           | 1 * 2500 artiklar | KP-SIL-3062 |
| MIKROSKOP KP PLUS OBJEKTGLAS FÖR UTSKRIFT          | 1 * 72 artiklar   | PR-P-001    |
| MIKROSKOP KP SILAN OBJEKTGLAS FÖR UTSKRIFT VITA    | 1 * 2500 artiklar | PR-S-001    |
| MIKROSKOP KP SILAN OBJEKTGLAS FÖR BLÄCKSTRÅLE VITA | 1 * 2500 artiklar | PR-IS-001   |
| MIKROSKOP KP CYTOLOGISKA OBJEKTGLAS                | 1 * 100 artiklar  | PR-C-001    |

### AVSEDD ANVÄNDNING

Självhäftande objektglas KP-SIL-30xx, PR-S-001 och PR-IS-001 är avsedda att användas in vitro av hälso- och sjukvårdspersonal för diagnostiska histopatologiska undersökningar av prover som tas från människokroppen för någon av följande typer av färgning av prov i undersökningsförloppet:

- immunhistokemisk färgning
- hematoxylin och eosin-färgning
- färgning av frusna snitt

Självhäftande objektglas PR-P-001 är avsedda att användas in vitro av hälso- och sjukvårdspersonal för diagnostiska histopatologiska undersökningar av prover som tas från människokroppen för någon av följande typer av färgning av prov i undersökningsförloppet:

- hematoxylin och eosin-färgning
- färgning av frusna snitt

Självhäftande objektglas PR-C-001 är avsedda att användas in vitro av hälso- och sjukvårdspersonal för diagnostiska cytopatologiska undersökningar av prover som tas från människokroppen:

- screening av kvinnor för att upptäcka cancer i livmoderhalsen.

Alla typer av objektglas är lämpliga för förberedelse av diagnostiska analyser, och de är avsedda för engångsbruk. Den avsedda patientpopulationen är mänskliga patienter i behov av nämnda undersökningar.

### SAMMANSÄTTNING

Produkten består av glas baserat på natriumkarbonat och kalk.

### PRINCIP

Metoden som används som förberedelse av objektglas för mikroskopi måste utföras i enlighet med respektive bruksanvisning som tillhandahålls av de olika leverantörerna av systemen eller proverna, eller genom användning av bruksanvisningen för ditt eget godkända tillvägagångssätt. När ett tillvägagångssätt för en mikroskopisk undersökning väljs, ska du följa bruksanvisningen som tillhandahålls av leverantören av glasvaror för laboratoriet, eller anvisningarna som innefattas i ett godkänt internt tillvägagångssätt. Du måste se till att mikroskopen används med lämpliga ljuskällor och våglängder.

### ANVÄNDNINGSBEGRÄNSNING

Inte tillämpligt.

### PROVER


Produkten är avsedd att användas med prover av histologisk vävnad och cytologiska cellsuspensioner. Därför måste produkten användas i kombination med täckglas.

### BEREDNING AV REAGENS

Inte tillämpligt.

### FÖRVARINGSVILLKOR OCH HÅLLBARHET

Produkten måste förvaras på en torr och välventilerad plats i sin originalförpackning.

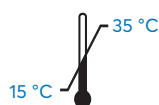

Öppna inte förpackningen innan objektglaset har nått rumstemperatur.

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Objektglas för mikroskopi är bruksfärdiga och efter att de har nått rumstemperatur kan de användas utan någon förberedande åtgärd.

Om de diagnostiska processer som du använder kräver någon förberedande åtgärd som innefattar objektglas för mikroskopi, måste åtgärden eller åtgärderna utföras i enlighet med respektive bruksanvisning som tillhandahålls av de olika leverantörerna av systemen eller proverna, eller genom användning av ditt eget godkända tillvägagångssätt.

Områden för märkning på objektglas för mikroskopi används för entydig identifiering av beredningar. Lämpliga pennor som motstår lösningsmedel om det behövs ska användas för detta syfte.

## BORTSKAFFNING

Använda objektglas för mikroskopi måste betraktas som infekterat avfall. Glasvaror för laboratorier kan också innehålla ämnen som ska behandlas som specialavfall. Kassera enligt tillämpliga lagar och bestämmelser.

## VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

### Varning!



Efter utgångsdatumet får produkten inte längre användas och måste kasseras på lämpligt sätt.

Var medveten om risken för glassplitter vid hantering av objektglas för mikroskopi och vidta lämpliga säkerhetsåtgärder, t.ex. använd handskar och ögonskydd.

Använd inte objektglas för mikroskopi om produkten är skadad.



Endast för engångsbruk. Kassera produkten efter användning.

## FRISKRIVNING

Vi lägger största vikt vid kvaliteten på våra produkter. Vid felfunktion eller missnöje: Vänligen använd klagomålsformuläret på kontaktsidan för din lokala **vwr.com**-webbplats och ange referens- och batchnummer för berörd produkt.

Användaren måste vara medveten om de möjliga risker som kan uppstå om produkten används för annat ändamål än det som anges. Denna bruksanvisning undantar inte användaren från att ha kunskap om och implementera all information som reglerar användarens aktivitet. Det är användarens skyldighet att vidtaga de relevanta försiktighetsåtgärder som är nödvändiga vid användningen av denna produkt.

## ANVÄNDA SYMBOLER

| Symbol                                                                              | Symbolnamn och beskrivning                                                  | Symbol                                                                              | Symbolnamn och beskrivning                     | Symbol                                                                                | Symbolnamn och beskrivning   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     | CE-märkning för överensstämmelse                                            |    | Medicinteknisk produkt för in vitro-diagnostik |    | Får inte återanvändas        |
|   | Katalognummer                                                               |  | Produktantal i lådan                           |  | Ömtålig, hanteras försiktigt |
|  | Använd inte produkten om förpackningen är skadad, och följ bruksanvisningen |  | Tillverkare                                    |  | Tillverkade i Kina           |
|   | Läs bruksanvisningen eller den elektroniska bruksanvisningen                |  | Unik produktidentifikation                     |  | Försiktighet                 |
|  | Används före-datum                                                          |  | Tillverkningsdatum                             |  | Temperaturbegränsning        |
|   | Batchnummer                                                                 |  | Utsätt inte för direkt solljus                 |  | Förvaras torrt               |

## LOGG ÖVER ÄNDRINGAR

Denna bruksanvisning fastställdes i juni 2023 och ersätter alla föregående bruksanvisningar. Informationen baseras på vår nuvarande kunskap och erfarenhet.

### Version 02

Ändringar som avser den senaste versionen av bruksanvisningen:

- Allmän uppdatering av layouten
- Mindre korrigeringar och förtydliganden

## KONTAKT



### VWR International B.V.

Orlyplein 85  
1043 DS Amsterdam, the Netherlands  
SRN: NL-MF-000030629  
+31 (0)20 4808 400  
[info.nl@avantorsciences.com](mailto:info.nl@avantorsciences.com)  
[www.vwr.com](http://www.vwr.com)

Alla allvarliga incidenter som förekommer i samband med denna produkt måste anmälas till tillverkaren samt till ansvarig myndighet i det land där användaren och/eller patienten har sin hemvist.